


# Wie immer. Nur besser.

Die gegenläufige Verbandtechnik nach Pütter bewirkt eine sehr hohe Entlastung, die auch die tiefen Venen erreicht.

## Tipps in der Anwendung

- Nach dem Waschen (bis 95°C) erhält die Binde ihre volle Elastizität zurück.
- Mehr Infos inklusive Anwendungsvideo unter [www.puetterflex.com](http://www.puetterflex.com).

## Kurzanleitung „modifizierter Pütterverband“

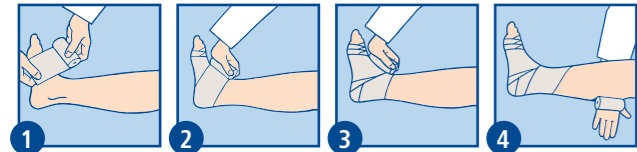


**1** Fuß rechtwinklig stellen und mit der ersten Bindentour von innen nach außen an den Zehengrundgelenken beginnen.

**2** Nach 2-3 Touren um den Mittelfuß herum umschließt die Binde dann die Ferse und führt über den Innenknöchel zum Rist zurück.

**3** Mit je einer weiteren Tour, zuerst oben, dann unten, werden die Ränder der ersten Fersentour zusätzlich fixiert. Nach einer weiteren Tour um den Mittelfuß führt die Binde über die Sprunggelenksbeuge zur Fessel zurück.

**4** Anschließend der Form des Beines folgend in steilen Touren die Wade umschließen. Die Binde darf nur in Abrollrichtung angezogen werden.

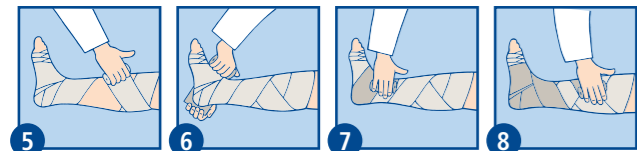

**5** Von der Kniekehle läuft die Binde einmal um das Bein herum, führt dann der Beinform entsprechend wieder nach unten und schließt vorhandene Lücken im Verband.

**6** Die zweite Binde wird gegenläufig von außen nach innen am Knöchel angesetzt und führt mit der ersten Tour über die Ferse zum Fußrücken zurück.

**7** Zwei weitere Touren fixieren zuerst den oberen und dann den unteren Rand dieser Fersentour.

**8** Anschließend läuft die Binde noch einmal um den Mittelfuß und dann in gleicher Weise wie die erste steil nach oben und wieder zurück. Der fertige Verband wird mit Klammern oder Fixierpflaster (z.B. Omniplast) an der Außenseite des Verbandes fixiert.



hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Besuchen Sie uns im Internet  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)



Binden in verschiedenen Breiten für einen individuellen, bedarfsgerechten Einsatz.

Handelsformen	Packungsinhalt	Artikelnr.	Verpackungseinheit
<b>PütterFlex</b> mit Verbandklammern, gedehnt 5m lang, einzeln in Faltschachteln			
6 cm	1 Binde	931827	40
8 cm	1 Binde	931828	40
10 cm	1 Binde	931829	40
12 cm	1 Binde	931830	60
<b>PütterFlex</b> mit Verbandklammern, gedehnt 5m lang, lose in Kartons			
6 cm	10 Binden	931831	8
8 cm	10 Binden	931832	8
10 cm	10 Binden	931833	8
12 cm	10 Binden	931834	8
<b>PütterFlex-Set</b>			
10 cm	2 Binden	931826	30



**NEU!**

# Pütter®Flex

## Die Komfort-Kompression für mehr Mobilität.



Kompressionstherapie

# Ein Widerspruch, der keiner mehr ist: Kompression und Komfort.

Der Erfolg einer Kompressionstherapie geht einher mit der aktiven Kooperation des Patienten. Die ideale Binde ist folglich die, die bequem zu tragen ist und zugleich eine effiziente Kompression sicherstellen kann. Diese Eigenschaften steigern die Chancen um ein Vielfaches, dass der Patient die Therapie bis zum Schluss unterstützt.

Die Kombination von Komfort und Kompression war jedoch in der Vergangenheit nicht immer gegeben. Gerade bei Binden passte der gewickelte Fuß oftmals nicht mehr in den Schuh und hemmte die Patienten in ihrer Mobilität. Zudem wird der therapeutisch notwendige Druck oftmals als unangenehm empfunden. Für diese Probleme gibt es jetzt eine Lösung: die neue PütterFlex.

Das luftdurchlässige Material fördert ein angenehmes Tragegefühl für den Patienten.



## Pütter®Flex

Aufgrund des geringen Ruhedrucks kann die Binde auch nachts getragen werden.

Die Binde ist in alle Richtungen flexibel und schmiegt sich dadurch auch an schwierigen Bereichen besser an. Dies erleichtert das Anlegen und erhöht den Tragekomfort.

### Sitzt und passt!

Die Binde ist so dünn, dass der gewickelte Fuß besser in den Schuh passt. Das steigert die Alltagstauglichkeit der Therapie.



### Gesunde Beweglichkeit

Die Beweglichkeit im Sprunggelenk bleibt weitestgehend erhalten, so dass sich der Patient im Alltag weiterhin frei bewegen kann. Und da jeder Schritt die Muskelvenenpumpe unterstützt, wird die Wirksamkeit der Kompressionstherapie gefördert.

# Gut kombiniert. Bessere Ergebnisse.

Zum Beispiel PütterFlex mit einer individuell auf die Heilungsphase abgestimmte Wundauflage von HARTMANN. Diese hochwirksame Therapie lässt sich von Fall zu Fall spezifisch anpassen und erleichtert Ihnen die erfolgreiche Behandlung.



-  **TenderWet 24 active**  
Zur aktiven Wundreinigung bei chronischen und infizierten Wunden, zur schonenden Ablösung von Nekrosen, Keimreduktion und Wundbettsanierung.
-  **Atrauman Ag**  
Zur Behandlung von infektionsgefährdeten oder infizierten Wunden sowie zur Infektionsprophylaxe bei chronischen oder akuten Wunden.
-  **PermaFoam**  
Zur Behandlung oberflächlicher sowie stark bis mäßig sezernierender Wunden, besonders bei empfindlicher oder vorgeschädigter Wundumgebung, und infizierter Wunden in Kombination mit Atrauman Ag.
-  **Hydrocoll**  
Zur Behandlung mäßig bis schwach sezernierender, nicht infizierter Wunden.
-  **Hydrocoll thin**  
Zur Behandlung schwach sezernierender und bereits epithelisierender Wunden.
-  **Hydrosorb**  
Zur Behandlung von Wunden in der Epithelisierungsphase und Verbrennungswunden bis zum 2. Grad.
-  **HydroTac**  
Für die Behandlung von mäßig bis leicht sezernierenden Wunden.

### Vorteile für den Patienten

- Hoher Tragekomfort
- Passt in normale Schuhe
- Mehr Beweglichkeit im Sprunggelenk.
- Tag und Nacht tragbar

[www.combisensation.com](http://www.combisensation.com)